




RENDELŐI

Opalescence® Endo®



- 35% hidrogén-peroxid, paszta állagú anyag
- Elszíneződött gyökérkezelt fogak fehéritése ún. „walking bleach” módszerrel
- A gyökércsatorna bemenetét üvegionomer cementtel kell lezárni a fehéritő anyag kavitásba helyezése előtt, majd ideiglenes tömással ellátni
- 3-5 napig aktív marad a pulpakamrában
- Testhőmérséklet aktiválja

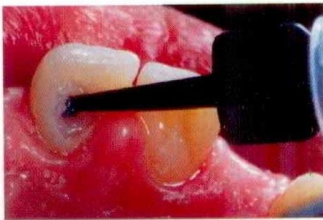

Kiszerezés:

UP-1270 Opalescence Endo Készlet

Tartalma: 2 X 1.2ml Endo fecskendő
20db fecskendő végződés